

ABCB1-Test: Anleitung zur venösen Blutentnahme

Der ABCB1-Test kann abhängig vom durchführenden Labor mit venösen oder kapillaren Blutproben durchgeführt werden. **Nähere Informationen zur kapillaren Blutentnahme finden Sie im Dokument:**

➔ [Anleitung zur kapillaren Blutentnahme](#)

Kurzanleitung



1) Anforderungsschein ausdrucken

Gehen Sie auf die Website Ihres durchführenden Labors, und drucken Sie den Anforderungsschein und die Einwilligungserklärung zur genetischen Diagnostik aus. Der ABCB1-Test ist eine molekulargenetische Untersuchung, für die gemäß Gendiagnostikgesetz eine schriftliche Einwilligungserklärung des Patienten zur Durchführung genetischer Analysen erforderlich ist.




2) Anforderungsschein ausfüllen und unterschreiben

Füllen Sie den Anforderungsschein und die Einwilligungserklärung für die Labordiagnostik gemeinsam mit Ihrem Patienten aus.



3) Venöse Blutentnahme

Sie nehmen dem Patienten mit einem EDTA-Röhrchen venöses Blut ab.

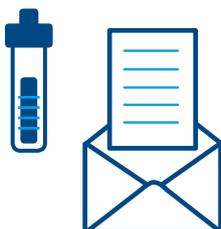

4) Versand an ein Labor

Versenden Sie das EDTA-Blutentnahmeröhrchen mit den ausgefüllten Formularen unter Verwendung eines frankierten handelsüblichen Briefumschlags an die auf dem Anforderungsschein angegebene Adresse des durchführenden Labors.



5) Erhalt des Befunds

Sie erhalten das Ergebnis der ABCB1-Genotypisierung mitsamt individueller Therapieempfehlung per Post oder Fax vom durchführenden Labor. Der ABCB1-Test ermöglicht die individuelle Vorhersage der geeigneten Medikation zu Behandlungsbeginn. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Ansprechens auf Antidepressiva, unerwünschte Nebenwirkungen werden reduziert, und erfolglose Behandlungsversuche werden vermieden.